



CellSonic

CellSonic™ Ltd.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com

www.cellsonic-beauty.com

SynchroWave es un litotritor radial de la onda de choque combinado con y sincronizado a un dispositivo de electroterapia. El dispositivo de electroterapia pulsa sincronizado con la onda sonora emitida por la pieza de mano. El efecto de esta combinación de pulso y onda de choque tiene un efecto de romper grasa intercalada entre piel y musculo. Los tratamientos se pueden aplicar por todas partes el cuerpo. La técnica de **SynchroWave** satisface especialmente en el abdomen. El **SynchroWave** necesita de un compresor para aire para su funcionamiento.



Tratamiento de **SynchroWave** puede ser aplicado fácilmente con los siguientes pasos:

Seleccioné el área de tratamiento y coloque las almohadillas de electroterapia a unos 100 mm cada lado del área seleccionada.

Aplique gel CellSonic™ gel en el área seleccionada y pase la punta de la pieza de mano suavemente sobre la zona de tratamiento. Inicie el tratamiento con el pedal.

El paciente tendrá una sensación suave de cosquilleo. La máquina se ajusta para que el paciente este cómodo. Durante toda la aplicación el paciente está en conversación con el operador.

La máquina se prende y apaga cada diez segundos mientras el pedal se mantenga apretado. Esto le permite el cuerpo ajustarse y evita cualquier daño. La sincronización, la eficiencia y la seguridad son características exclusivas de CellSonic™ SynchroWave.

La sesión de tratamiento puede durar una hora y se repite con la frecuencia necesaria, por lo generalmente dos veces por semana.

Después del tratamiento, limpie de la CellSonic™ gel y aplique crema CellSonic™ que contiene un agente de endurecimiento de la piel. La crema debe ser usada diariamente.

CellSonicAmericas

1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida33012
305 559 0842- 305 608 3622 (Cel)
cellsonicamericas@bellsouth.net
Skype ID gva1936

Representante



CellSonic

CellSonic™ Ltd.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com

www.cellsonic-beauty.com

Controlador

Voltaje :	230 V ±10% AC @ 50-60 Hz
Fuerza Eléctrica :	25 Vatios
EN60601-1 Clase	II
EN60601-1 Tipo	BF
Entrada de Fuerza	Montada en un Panel IEC C14 con 3 pines.
Protección (Tierra eléctrica)	Una tierra eléctrica para protección del paciente o operadores
Fusible :	500 mA, 5X20mm, de acción rápida
Frecuencia de Impactos :	10 niveles (1 a 10 impactos por segundo)
Indicadores :	LCD
Impactos por ciclo :	1500 aproximadamente
Dimensiones:	225 L X 32 Ø mm
Peso :	31 kg.
Temperatura de operación	15° - 35° C
Protección (Grado)	IP20
Manijas	Dos Manijas al lado para transporte y maniobrar el equipo.
Presión de entrada	3 Kg/cm ² min., 4 Kg/cm ² típica, 5 Kg/cm ² máx.
Control de Nivel de Energía salida:	Digital, 10 diferentes
Gas de entrada :	Aire limpio filtrado comprimido
Modo de cambiar :	Teclado de Toque Ligero
Salida de Estimulador:	Pulsado, a través de 2 electrodos de silicón controlados en la consola
Ciclos de Relajación / contracción:	10 Sec. / 10 Sec.
Control de Energía de Estimulación:	Variable de 10% a100% con un botón rotativo

Pieza de Mano

Frecuencia de operación :	0~10 Hz
Peso:	350 gm
Esterilización:	Oxido Etileno, Formaldehido o Esterilización Liquida
Protección (Grado)	IP20

Electrodo de Estimulación

Dimensiones :	75mm Ø
Tipo :	Flexible, reusable.
Peso:	40 gm
Esterilización:	Oxido Etileno, Formaldehido o Esterilización Liquida

Pedal:

Dimensiones :	100 X 80 X 30mm
Tipo :	Apretar ON, Soltar OFF
Peso:	300 gm
Protección (Grado)	IP20

CellSonicAmericas

1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida33012
305 559 0842- 305 608 3622 (Cel)
cellsonicamericas@bellsouth.net
Skype ID gva1936

Representante